


# Erihyd Forte

Дезинфицирующее средство

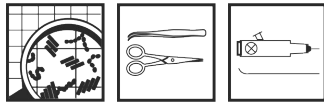

Объекты/области применения

Используется для дезинфекции резинового и пластмассового оборудования, для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним), для дезинфекции гибких эндоскопов, а также для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и инструментов к ним.

Характеристики продукта

- Эффективное и безопасное средство для инструментария.
- Препарат отличается мягкостью и широкий антимикробный спектр действия.
- Обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными спороцидными) и фунгицидными свойствами. В качестве дезинфицирующего средства используется 2,5 % активированный глутаровый альдегид.
- По параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу малоопасных при нанесении на кожу, к умеренно токсичным веществам - при парентеральном введении.
- Средство безопасно для персонала при правильном его использовании.

Инструкция по использованию и дозировке

Инструкции по использованию средства подробно изложены в отдельной инструкции по применению.

Так как средство Erihyd Forte фиксирует органические загрязнения, обязательно вымыть изделия медицинского назначения перед дезинфекцией и стерилизацией.

Дезинфекция ИМН осуществляется в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками.

Вымытые инструменты/оборудование погрузить в дезинфицирующее средство Erihyd Forte в ёмкости с крышкой. Обращать внимание на то, чтобы дезинфицируемые инструменты были полностью покрыты дезинфицирующим средством, и оно беспрепятственно попадало во все каналы, внутренние части и поверхности. После экспозиции оборудование тщательно сполоснуть и высушить.

Один и тот же дезинфицирующий раствор можно использовать в течение месяца, если этот раствор визуально чистый.

Внимание

Использовать защитные перчатки, избегать попадания средства в глаза и на кожу. Работы со средством проводить в хорошо проветриваемом / вентилируемом помещении. Емкости со средством при обработке изделий должны быть закрыты крышкой.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Глутаральдегид	2,5%	Дезинфицирующий компонент
Функциональные компоненты		Буферное вещество, противокоррозийное вещество

pH продукта

ок. 6.5

Внешний вид и запах

Прозрачная бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом.

Хранение	Хранить в темном месте при температуре +15°C - +30°C Срок годности средства - 3 года с даты производства в упаковке производителя.										
Окружающая среда и безопасность	<p>Не допускать попадания продукта в окружающую среду.</p> <p>Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.</p> <p>Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта</p>										
Упаковочные материалы	5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP										
Код продукта, размер упаковки	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="368 546 683 613">Минимальная партия</th> <th data-bbox="683 546 903 613">Код продукта</th> <th data-bbox="903 546 1166 613">Штрих-код</th> <th data-bbox="1166 546 1509 613">Упаковка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 613 683 660">3 x 5 л</td> <td data-bbox="683 613 903 660">205099</td> <td data-bbox="903 613 1166 660">4607070470663</td> <td data-bbox="1166 613 1509 660">канистра</td> </tr> </tbody> </table>			Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка	3 x 5 л	205099	4607070470663	канистра
	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка							
3 x 5 л	205099	4607070470663	канистра								